

# Atelier anneaux de contraception thermique par Otoko

Prise de note du 26 sept 2023, à compléter par des photos et développer

<https://samflam.notion.site/samflam/Tutoriel-Silicone-3bac4b5a6a254ba9bab7c9ec88f7ef35>

présentation de la méthode de contraception thermique  
essayages  
moulage  
séchage

balance  
silicone  
huile de silicone  
nacres colorées  
paillettes  
pompe à vide  
batonnets de glace pour mélanger  
contenants plastiques  
gants nitrile  
des seringues  
un coupe-fil

le silicone est composé de 2 composantes (A et B)

nettoyer et préparer les moules

préparation d'un mélange

- verser 100gr de composante A
- verser 14gr d'huile de silicone (plus on en met, plus le résultat sera souple)
- verser une pointe de couteau de nacre colorée
- ajouter des paillettes :)
- mélanger en touillant
- ajouter 100gr de composante B (TODO vérifier)
- passer à la pompe à vide pour éliminer les bulles
- remplir les seringues du mélange jusqu'à vider le pot, on remplit les seringues par le haut (PAS en aspirant, le mélange est trop visqueux)
- injecter dans les moules jusqu'à ce que ça déborde, laisser reposer et réinjecter si nécessaire
- laisser sécher
- démouler
- couper les "barbures" au coupe-fil

Article extrait de : <https://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : [https://lesporteslogiques.net/wiki/atelier/anneaux\\_de\\_contraception\\_thermique](https://lesporteslogiques.net/wiki/atelier/anneaux_de_contraception_thermique)

Article mis à jour: **2023/09/29 22:08**